



輔具體驗展示資料卡

輔具使用說明

參考官網輪椅使用手冊

輪椅展開：

1. 將推手拉起，並確認後彎關節卡至定位。
2. 向外拉開兩側扶手，十指向內將座墊管慢慢往下壓至定位。
3. 將撥腳旋轉扣合定位。
4. 將頭靠管插入背墊固定管內。

空中傾倒角度調整：

1. 請將左右兩側之剎車固定。
2. 將雙手置於兩側推手把上，右手將操作握把（黑色）提起握緊。
3. 雙手同時出力向下壓，操作至欲停留的角度時將操作握把放開即可。

如何坐進輪椅：

1. 將剎車固定。
2. 將腳踏板掀起。
3. 坐進輪椅，並利用扶手移動身體。
4. 將腳踏板轉回原處，並調整高度，讓使用者的雙腳可舒服的放置於上方。
5. 繫上骨盆帶
6. 釋放剎車後可以使用。

如何由輪椅起身：

1. 確定輪椅與欲移動身體的目的地間，已是最近距離。
2. 將剎車固定。
3. 將腳踏板掀起。
4. 解開骨盆帶
5. 在座位上將身體挪移至所需位置。