

輔具使用說明

輪椅展開：

- 1.將推手拉起，並確認後彎關節卡至定位。
- 2.向外拉開兩側扶手，十指向內將座墊管慢慢往下壓至定位。
- 3.將撥腳旋轉扣合定位。

如何坐進輪椅：

- 1.將剎車固定。
- 2.將腳踏板掀起。
- 3.坐進輪椅，並利用扶手移動身體。
- 4.將腳踏板轉回原處，並調整高度，讓使用者的雙腳可舒服的放置於上方。
- 5.繫上骨盆帶。
- 6.釋放剎車後可以使用。

如何由輪椅起身：

- 1.確定輪椅與欲移動身體的目的地間，已是最近距離。
- 2.將剎車固定。
- 3.將腳踏板掀起。
- 4.解開骨盆帶。
- 5.在座位上將身體挪移至所需位置。