

輔具使用說明

特製輪椅空中傾倒功能：

1. 將輪椅煞車。
2. 將輪椅後方防傾桿旋轉 180 度。
3. 按壓輪椅握把，使輪椅往後無段式傾倒。
4. 空中傾倒輪椅，坐姿時的髖關節角度不改變。

特製輪椅仰躺功能：

1. 將輪椅煞車。
2. 將輪椅後方防傾桿旋轉 180 度。
3. 按壓輪椅握把，使輪椅往後無段式仰躺。
4. 將腳靠抬起。
5. 仰躺輪椅，可改變椅背角度，使用者可以躺下。

如何坐進輪椅：

1. 將剎車固定。
2. 將腳踏板掀起。
3. 坐進輪椅，並利用扶手移動身體。
4. 將腳踏板轉回原處，並調整高度，讓使用者的雙腳可舒服的放置於上方。
5. 繫上骨盆帶、胸帶
6. 釋放剎車後可以使用。