

輔具使用說明

適用對象：

1. 下肢無力而行動不便，無法前往廁所如廁者。

高度調整：

1. 按下椅腳彈扣，調整便盆椅座高，使得雙腳穩定踏地。

使用說明：

1. 展開便盆椅，至於平整地面，定點使用。
2. 使用後，掀起便盆椅座墊，清理便盆。
3. 便盆椅具防水功能，卸下便盆，可當作沐浴椅使用。
4. 附輪便盆椅，移動到定點時，需將煞車固定，確保安全。