

輔具使用說明

適用對象：

1. 身體虛弱翻身困難，臥姿受壓處皮膚有壓傷風險者。
2. 肢體癱瘓無法自行翻身，臥姿受壓處皮膚有壓傷風險者。
3. 臥姿受壓處皮膚已有壓傷者。

如何放置氣墊床：

1. 搭配居家用照顧床床墊使用，放置於床墊之上，且氣墊床上方，不再鋪涼蓆或厚毛毯。
2. 氣墊床頭部端，有C P R洩壓閥；氣墊床尾端，有充氣管條連接主機。
3. 氣墊床底部四個角落有鬆緊帶，可套於床墊固定。
4. 肢體癱瘓無法自行翻身，臥姿受壓處皮膚有壓傷風險者。
5. 臥姿受壓處皮膚已有壓傷者。

使用說明：

1. 使用時需插電，110V。
2. 主機開機後，調整壓力旋鈕，使氣墊床充氣。
3. 等待約40分鐘至60分鐘，氣墊床充飽後（壓力過低燈號熄滅），依照使用者體重調整壓力。
4. 使用者躺上床，照顧者將手伸至氣墊床下方靠近臀部處，檢查手是否可觸及到使用者之臀部，若可觸及表示壓力不足需重新調整或檢查異常警示燈號。
5. 使用者躺氣墊床時，應呈現身體略微沉入但不觸底。