

輔具使用說明

適用對象：

1. 身體虛弱而翻身、起身困難者。
2. 肢體障礙達癱瘓程度而無法翻身、無法自行坐起者。

使用說明：

1. 居家用照顧床放置定位後，將四個輪子剎車固定。
2. 使用時需插電，110V。
3. 床板：分為 4 片，將使用者臀部置於第 2 片固定床板。
4. 護欄：升起護欄避免使用者滑落。當照顧者進行翻身、清潔等護理行為、轉移位時須放下護欄。
5. 電動升降功能操作，按壓電動遙控器可達升降頭、腳、頭腳連動及床面高度調整功能。
6. 使用者欲從躺姿坐起時，為了避免往床尾滑動，建議先將升腳再升頭部。
7. 床面高度調整：
 - (1). 床面高度調升，照顧者進行護理行為時，以避免彎腰。
 - (2). 床面高度調降，使用者坐於床邊時，應降低床面至雙腳著地。