



# 輔具體驗展示資料卡

補助項目	溝通輔具- 具掃描功能固定版面型語音溝通器								
輔具來源	<input checked="" type="checkbox"/> 政府補助購置： <u>        </u> 新竹縣政府 <input type="checkbox"/> 捐贈回收 <input type="checkbox"/> 伊甸自有 <input type="checkbox"/> 廠商借展示								
補助最低使用年限	4 年								
身份 經濟別	長照			身障			職災 認定	榮民 輔具	
購置 補助金額	低收	中低收	一般戶	20000	15000	10000	10000		
租賃 補助金額	不適用								
補助對象	不適用			符合下列條件之一： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第一類:智能障礙、自閉症、聲音機能或語言機能障礙者</li> <li>2. 第二類:聽覺機能障礙者</li> <li>3. 因身體功能及構造損傷(含腦性麻痺、腦傷、肌萎縮性脊髓側索硬化症、帕金森氏症、中風)造成言語溝通困難,且影響人際互動及社會參與者。</li> </ol>			請洽詢 新竹縣 勞工處	不適用	
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 除具重複錄音或記憶溝通訊息及放音功能外，另須提供至少一種掃描功能</li> <li>2. 電池使用兩顆 3 號電池，如長時間不使用，須將電池拿出避免漏液損害主機</li> </ol>								

# 輔具使用說明



特殊開關連接孔

錄音/撥放

音量控制/開關

頁層開關

## 功能：

1. 總錄音長度為 8 分鐘，並分成 3 頁，各頁格數均為 12 格，各頁每格可錄時間分別為 14、13、13 秒
2. 溝通板同時兼具燈光及語音掃描功能，可配合一組特殊開關使用，可選用單鍵或雙鍵方式來操作，以適合不同肢體障礙者

## 使用方式：

### 錄音

1. 轉換至錄音鍵(REC)與需要放置的層數(1、2、3)
2. 長按某一面板開始錄音
3. 結束後放開手指即可成功錄製

### 播放

- 以手動按壓觸摸面板方式溝通
- 單鍵跳格掃描:特殊開關插入 2 號孔，紅燈每隔 3 秒自動跳格，直到跳到所需格數位置後，按壓特殊開關以播放聲音
- 雙鍵跳格掃描:按特殊開關 1 選擇所需格數位置，再按壓特殊開關 2 以播放聲音